



HaemoCer™ PLUS

Blutstillungspulver mit adhäsionsprophylaktischer Funktion

- natürlich - sicher - effektiv
- 100 % resorbierbar
- made in Germany

HaemoCer™ PLUS

HaemoCer™ PLUS ist ein innovatives pulverförmiges Blutstillungsmittel auf pflanzlicher Basis zur unterstützenden Hämostase bei chirurgischen Eingriffen. Das komplett resorbierbare Material beschleunigt durch seine enorme Wasseraufnahme die natürliche Gerinnungskaskade, wodurch eine sofortige Blutstillung erfolgt.

NATÜRLICH

- Auf pflanzlicher Basis
- 100 % frei von tierischen und humanen Bestandteilen
- Vollständig resorbierbar

SICHER

- Reduzierung von Fremdkörperreaktionen
- Verringerung von Fremdblut- oder Transfusionsbedarf
- Umfangreiche Betreuung und Produktschulung durch den Hersteller

EFFEKTIV

- Verstärkte Saugwirkung
- Unmittelbar einsatzbereit ohne langwierige Vorbereitung, wie z. B. Auftauen oder Anmischen

DAPI

einfache Anwendung - effektive Wirkung



DRY

Austretendes überschüssiges Blut entfernen



APPLY

Zügig & großflächig HaemoCer PLUS auf die Blutungsquelle auftragen



PRESS

Mit einer trockenen Kompresse mäßigen Druck auf die Wunde ausüben



IRRIGATE

Zum Lösen der Kompresse diese ausreichend befeuchten, um Verklebungen zu vermeiden

Effektive Blutstillung




nach dem Vorbild der Natur

HaemoCer™ PLUS besteht zu 100 % aus gereinigter pflanzlicher Stärke ohne Zusatz von tierischen oder humanen Bestandteilen. Aufgrund seiner hydrophilen Eigenschaften besitzt HaemoCer™ PLUS eine extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit, wodurch die natürliche Blutgerinnung (Hämostase), ohne chemische oder pharmazeutische Interaktion, beschleunigt wird. Es kommt zu einer Anreicherung von Fibrin, Thrombin und roten Blutkörperchen an der Blutungsquelle. Es bildet sich ein körpereigener Clot und die Blutung wird gestillt. Nach erfolgter Blutstillung wird die Wunde von einer stabilen und fest haftenden Gel-Schicht umgeben. Diese dient als zusätzliche Barriere zum Schutz vor erneutem Blutaustritt.

1) Studien sowohl mit HaemoCer™ PLUS Blutstillungspulver als auch vergleichbaren Wettbewerbsprodukten haben gezeigt, dass das Gel eine mechanische Barriere darstellt und zur Reduzierung von postoperativen Adhäsionen beiträgt. HaemoCer™ PLUS wird durch Amylase innerhalb von wenigen Tagen vom Körper zu 100 % abgebaut, abhängig von der Menge des angewendeten Materials und der Stelle der Verwendung.

Blutstillungspulver

auf pflanzlicher Basis

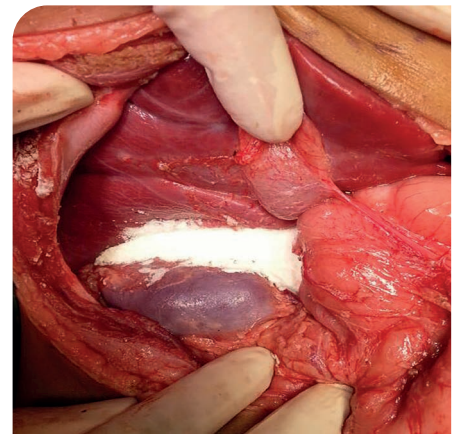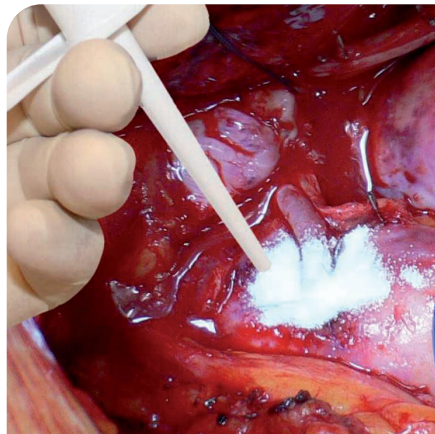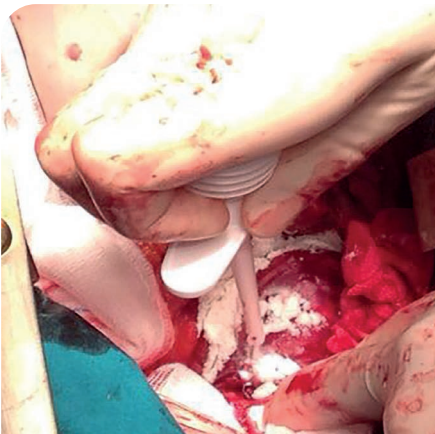

HaemoCer™ PLUS ist vielseitig einsetzbar:

- Versorgung von großflächigen und diffusen Blutungen
- Einsatz bei Stichkanalblutungen
- Eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Blutstillungsmitteln
- Ersatz von Knochenwachs zur Haemostase bei spongiösen Blutungen
- Auch bei maschineller Autotransfusion einsetzbar

Einsatzgebiete:

- Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie
- Allgemeinchirurgie
- Transplantationschirurgie
- Traumatologie
- Tumorchirurgie
- MKG-Chirurgie
- HNO-Chirurgie
- Urologie/Gynäkologie
- Orthopädie
- Verbrennungschirurgie
- Neurochirurgie



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Beschreibung	Menge/Größe	VE
HaemoCer™ PLUS			
HFP201	HaemoCer™ PLUS Blutstillungspulver	1 g	5 Stück
HFP202	HaemoCer™ PLUS Blutstillungspulver	2 g	5 Stück
HFP203	HaemoCer™ PLUS Blutstillungspulver	3 g	5 Stück
HFP205	HaemoCer™ PLUS Blutstillungspulver	5 g	5 Stück
HFZ101	HaemoCer™ Universal Applikator	440 mm	5 Stück
HFZ201	HaemoCer™ Flex Applikator	180 mm	5 Stück